

ПАСПОРТ

Эвакуационный лестничный стул (кресло) арт. 2553.



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ



2. НАЗНАЧЕНИЕ

Эвакуационное кресло - подъёмник – это универсальное решение для экстренной эвакуации, широко признанное в качестве устройства для спуска и подъёма по лестнице. В экстренных случаях, когда лифты перестают работать, люди с ограниченными возможностями перемещаются на первый этаж с помощью эвакуационного кресла. Эвакуационное кресло также может использоваться для людей с ограниченной подвижностью, слепых, страдающих астмой, травмированных, пожилых людей, беременных, страдающих эпилепсией и лиц со стенокардией.

Эвакуационное кресло - подъёмник может использоваться во время отключения электроэнергии, террористических атак, ложных тревог, стихийных бедствий: таких как пожар, наводнение, землетрясения и т. д.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер в рабочем состоянии со сложенной ручкой: 122*52*108 см

Размер в рабочем состоянии с выдвинутой ручкой: 122*52*160 см

Размер в сложенном виде: 109*52*24 см

Размер сидения: 42*45 см

Высота от пола до сиденья: 52 см

Вес: 19 Кг

Нагрузка: МАКС. 180 Кг


4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1 Разложите кресло, как показано на рисунке, возьмитесь одной рукой за сиденье, а другой - за телескопическую раму - держатель.




4.2 При необходимости разложите задние ручки, как показано на рисунке, до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении.

4.3 Сложите задние ручки: Нажмите на фиксаторы и сложите ручки вниз.

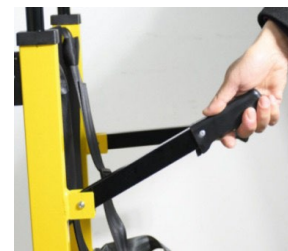

4.4 Разложите подлокотники, как показано на рисунке. Потяните подлокотники вверх, как показано на рисунке.

4.5 Разблокируйте гусеничный ремень: Нажмите на красную фиксирующую педаль

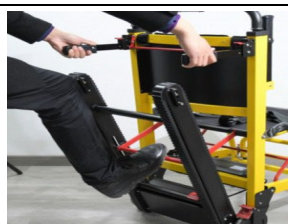

4.6 Установка направляющих ремней: Нажмите на красный рычаг.

4.7 Спускаясь вниз, оператор должен отрегулировать высоту рамы телескопического захвата так, чтобы она соответствовала высоте плеч оператора.



4.8 Разложите педаль, как показано на рисунке. Поверните педаль вверх, как показано на рисунке.

4.9 После того, как пассажир сядет, отрегулируйте ремень безопасности и при необходимости закрепите его, как показано на рисунке.





4.10 Выдвиньте телескопические передние ручки: нажмите красную кнопку и тяните за ручки до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении.

Складывание: нажмите красную кнопку и задвиньте ручки.

4.11 Возьмитесь за сиденье одной рукой, а другой - за раму, нажмите на откидную опорную скобу, затем, когда скоба выйдет из фиксирующего положения, сложите сиденье.




4.12 Блокировка тормозов: Нажмите на педаль тормоза. Разблокировка: для разблокировки нажмите на верхнюю часть педали тормоза.

4.13 Регулировка натяжения привода: для ослабления или усиления натяжения отрегулируйте ремень с помощью шестигранного ключа, как показано на рисунке.



6. ПОДЪЁМ

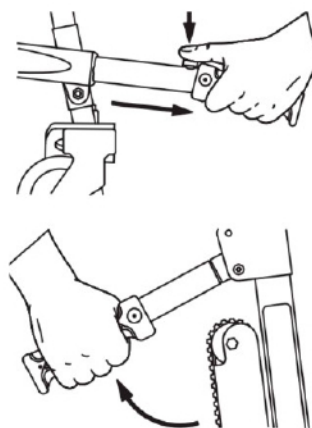

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

8. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 4

5. СПУСК

